



Fotos de pesarios cervicales perforados marca Dr Arabin.

(1) diámetro interno. (2) diámetro externo. (3) vista lateral.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

PRODUCTO: **PESARIO CERCLAGE PERFORADO MARCA DR. ARABIN.**

MODELO: **GESTACIÓN ÚNICA**

REFERENCIAS:

ASQ 65/17/32
 ASQ 65/21/32
 ASQ 65/25/32
 ASQ 70/17/32
 ASQ 70/21/32
 ASQ 70/25/32

MEDIDAS:

DIAMETRO EXTERNO: 65MM INTERNO: 32MM
 DIAMETRO EXTERNO: 65MM INTERNO: 32MM
 DIAMETRO EXTERNO: 65MM INTERNO: 32MM
 DIAMETRO EXTERNO: 70MM INTERNO: 32MM
 DIAMETRO EXTERNO: 70MM INTERNO: 32MM
 DIAMETRO EXTERNO: 70MM INTERNO: 32MM

MODELO: **GESTACIÓN GEMELAR**

REFERENCIAS:

ASQ 65/17/35
 ASQ 65/21/35
 ASQ 65/25/35
 ASQ 70/17/35
 ASQ 70/21/35
 ASQ 70/25/35

MEDIDAS:

DIAMETRO EXTERNO: 65MM INTERNO: 35MM
 DIAMETRO EXTERNO: 65MM INTERNO: 35MM
 DIAMETRO EXTERNO: 65MM INTERNO: 35MM
 DIAMETRO EXTERNO: 70MM INTERNO: 35MM
 DIAMETRO EXTERNO: 70MM INTERNO: 35MM
 DIAMETRO EXTERNO: 70MM INTERNO: 35MM

DESCRIPCIÓN: El pesario cervical es un anillo de silicona, blando, que se coloca alrededor del cuello uterino (cervix) para evitar el parto prematuro. Debe colocarse en las gestantes de alto riesgo de parto prematuro, es decir, las que presentan una longitud cervical disminuida. La longitud cervical disminuida se evidencia mediante la práctica de una ecografía transvaginal. . En la ecografía de la semana 20 puede realizarse la ecografía vaginal para medir la longitud cervical. Si ésta es ≤ 25 mm podría colocarse un pesario.

Para trastorno cervical, actúa sujetando la cervix y volviéndola hacia el sacro. Indicado para embarazadas con historial de prematuridad, madres sometidas a grandes esfuerzos, embarazo múltiple, prolapso genital. Tratar infecciones cervicales/vaginales previa colocación.

Datos Proveedor

PROVEEDOR: **LELEMAN, S.L**

CIF: **B- 46193827**

INDICAR SI ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DEL PRODUCTO: **DISTRIBUIDOR**

FAX/EMAIL PEDIDOS: **963760336/ leleman@ono.com**

Datos Específicos Producto


MARCA COMERCIAL: **DR ARABIN**

COMPOSICION/ COMPONENTES: **EL PESARIO CERCLAGE ESTÁ CONSTRUIDO CON SILICONA FLEXIBLE, QUE PUEDE PLEGARSE Y ASÍ SER INSERTADO SIN DOLOR.**

APARATOS ESPECÍFICOS: **NO**

INSTRUCCIONES DE USO:

El pesario cerclage debe ser colocado por el obstetra con la paciente acostada. Es importante que la curvatura del pesario sea orientada en dirección craneal para que el diámetro mayor se apoye en el suelo pelviano. Los pesarios pueden plegarse y fijarse preferentemente en los fónices vaginales. Para ello el cérvix debe ubicarse dentro del anillo interno. El obstetra debe controlar que el cérvix no sea estrangulado por el anillo (edematización). Después de la inserción deberá la paciente incorporarse y si el pesario ha sido bien colocado no deberá sentir molestia alguna. Normalmente las pacientes refieren un inmediato "alivio de las molestias del prolapso" después de la colocación. La inserción del pesario puede facilitarse con la ayuda de compuestos lubricantes, preferentemente cremas antibióticas que no destruyan la flora natural.

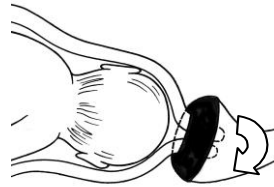

El pesario puede permanecer in situ teóricamente hasta las 37 semanas. De ser necesario, pueden realizarse periódicos controles mediante tacto vaginal para evaluar el lugar y posición del mismo. Dependiendo de los síntomas podrá ser necesaria la utilización de un espejulo.

Efectos colaterales/complicaciones: Una correcta colocación del pesario (con la curvatura y el diámetro menor hacia craneal) es muy importante para un tratamiento exitoso. Puede ocurrir en algunos casos un aumento del flujo vaginal, aunque el espectro de la flora vaginal no se verá alterada por la presencia del pesario. En caso de aparición de flujo sintomático deberá indicarse la realización de cultivo.

Aumento de la presión en el pesario (p.e. aparición de contracciones) puede llevar a la expulsión del mismo o la edematización del cervix. En algunos casos el cervix puede estrangularse (dolor en el tacto vaginal) y el pesario deberá ser extraído para inspección del cuello y eventual diagnóstico de encarceración.

En caso de sangrado vaginal o ruptura de membranas, el pesario debe ser extraído para el manejo del cervix, disminuir posibles infecciones e indicar posteriores tratamientos.

CONSERVACIÓN:



Este producto sólo debe usarse uno por paciente y debe guardarse a temperatura ambiente. **El pesario debe limpiarse con agua corriente tibia y no es necesario el uso de desinfectantes.**

El pesario debe ser lavado con agua corriente tibia y puede ser esterilizado hasta una temperatura de (134 ° C /3.8 bar) al vapor o al aéreo ávido hasta (250°C).

Datos Logísticos

ENVASADO: **UNITARIO**

PEDIDO MÍNIMO: 4 UNIDADES DE CADA REFERENCIA.

MARCADO CEE: **SI. PRODUCTO CLASE IIb. CE0482**

TIEMPO DE CADUCIDAD: **10 AÑOS**