

FICHA TECNICA



DENOMINACIÓN: Pack de gel frío marca Beekley Medical.

INDICACIONES: Para aplicar en la mama frío dirigido y efectivo después de procedimientos de biopsia de mama mínimamente invasivos y de esa forma reducir el sangrado, los hematomas, el dolor y la inflamación.

Principales ventajas:

- Pack de gel frío que dura 3 veces más que los packs químicos y de hielo.
- Con lengüetas laterales autoadhesivas que garantizan su permanencia en el sitio escogido.
- Son discretos, confortables y no irritantes.

REFERENCIAS:

500



MEDIDAS: 2.75" x 3"
- pack de gel frío

100 unidades x caja

502



MEDIDAS: 2" x 3"
- Pack de gel frío avanzado
Diseño floral

68 unidades x caja

505



MEDIDAS: 2" x 3"
- Pack de gel frío avanzado
con revestimiento de tela
suave y flexible, forma
almohada

50 unidades x caja

CONSERVACIÓN: Sin indicaciones específicas.

Instrucciones de uso:

- Congelar un mínimo de 2 horas antes de su uso.
- Extraer el pack y la gasa estéril de su envase exterior.
- Aplicar la gasa al sitio de aspiración o biopsia.
- Retirar las bandas laterales adhesivas (si se desea).
- Centrar el pack sobre el sitio, aplicar a la piel.
- Si necesita ser reutilizado volver a congelar un mínimo de 2 horas.

Látex: NO

Marcado CE. SI.

Producto: Clase I no estéril.

Advertencias:

- Para uso en un solo paciente.
- Producto no estéril.
- Retirar después de no más de 2 horas para evitar potencial reacción adversa de la piel al adhesivo.